

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1001	Tinció de Gram orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	PUNCIÓ RENAL ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	1 dia	04/04/2014
1009	Tinció de Gram exsudat uretral	Utilitzar escovilló fi amb medi de transport, 2 cm dins de la uretra. Recollir la mostra al menys després de 2 hores de la última micció.	EXSUDAT URETRAL	1 dia	04/04/2014
1400	Tinció de Gram exsudat endocervical	Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec. Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT ENDOCERVICAL	1 dia	04/04/2014
1405	Tinció de Gram exsudat vaginal	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT VAGINAL	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1900	Tinció de Gram semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	1 dia	04/04/2014
2001	Urocultiu orina espontània	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA ESPONTÀNIA	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2002	Urocultiu cateterisme	Neteja de la zona genital. Obtenir la mostra per sondatge, descartant la primera part de l'orina.	ORINA CATETERISME	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2003	Urocultiu punció vesical	Seguir una asèpsia quirúrgica. Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)	ORINA PUNCIÓ VESICAL	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2004	Urocultiu cateterisme ureteral	Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts.	ORINA CATÉTER URETERAL	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2005	Urocultiu orina nefrostomia	Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts.	ORINA NEFROSTOMIA	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2006	Urocultiu post-mas. prostàtic	Recollir l'orina després de practicar el massatge prostàtic.	ORINA POST MAS. PROSTATIC	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2008	Urocultiu sonda permanent	Desinfectar el conus de la sonda. Recollir amb xeringa i agulla uns 10 mL d' orina i transferir a un tub estèril.	ORINA SONDA PERMANENT	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2009	Urocultiu orina uretral	Neteja de la zona genital. Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA URETRAL	2-3 dies	04/04/2014
2010	Urocultiu orina vesical	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció, en un contenidor estèril	ORINA VESICAL	2-3 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2011	Urocultiu nens <7 dies	Rentar la zona genital i perineal. Col·locar la bossa de plàstic (1 hora màxim) i recollir l'orina. Transferir a un contenidor estèril.		1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2015	Cultiu exsudat uretral	Utilitzar escovilló fi amb medi de transport, 2 cm dins de l'uretra. Recollir la mostra al menys després de 2 hores de l'última micció.	EXSUDAT URETRAL	4 dies	04/04/2014
2016	Cultiu Mycoplasma ex. uretral	Utilitzar escovilló fi amb medi de transport. Recollir la mostra al menys després de 2 hores de l'última micció.	EXSUDAT URETRAL	2 dies	04/04/2014
2017	Cultiu punció renal	Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.	PUNCIÓ RENAL	1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu.	04/04/2014
2210	Cultiu exsudat balano-prepuci	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	BALANO-PREPUCIAL	4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2400	Cultiu exsudat endocervical	Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec. Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT ENDOCERVICAL	4 dies	04/04/2014
2401	Recerca Mycoplasma ex. endocer	Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec. Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport	EXSUDAT ENDOCERVICAL	2 dies	04/04/2014
2405	Cultiu exsudat vaginal	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT VAGINAL	4 dies	04/04/2014
2407	Recerca Mycoplasma ex. vaginal	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT VAGINAL	2 dies	04/04/2014
2410	Cultiu exsudat uterí	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT UTERÍ	4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2415	Cultiu exsudat trompa uterina	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT TROMPA UTERINA	4 dies	04/04/2014
2420	S. agalactiae frotis rectal	Frotis amb escovilló amb medi de transport. Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.	EXSUDAT RECTAL	2 dies	04/04/2014
2421	S. agalactiae frotis vaginal	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT VAGINAL	2 dies	04/04/2014
2422	S. agalactiae vaginal-rectal	Frotis amb escovilló amb medi de transport. Recollir primer el frotis vaginal i posteriorment el frotis rectal.	EXSUDAT VAGINAL - RECTAL	2 dies	04/04/2014
2900	Cultiu de semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 10 - UROGENITALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2902	Recerca Mycoplasma en semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	2 dies	04/04/2014
2905	Recerca leucòcits en semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	1 dia	04/04/2014
3001	Mycoplasma orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA VESICAL ORINA URETRAL BIOPSIA ABSCÉS ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	2 dies	04/04/2014
3003	Mycoplasma orina uretral	Neteja de la zona genital. Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril.		2 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 20 - COPRO/PARÀSITS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1020	Recerca leucòcits en femta	Recollir en un recipient estèril. Escollir les zones amb sang, moc o pus.	FEMTA	1 dia	04/04/2014
1140	Test de Graham	Recollir la mostra al matí, abans de la higiene. Amb un tros de paper adhesiu transparent (cel·lo) presionar els marges annals. Adherir el tros de cel·lo a un portaobjectes i posar en un recipient hermètic.		1 dia	
2020	Coprocultiu	Recollir en un recipient estèril. Escollir les zones amb sang, moc o pus.	FEMTA MOSTRA SIGMOIDOSCÒPIA EXSUDAT RECTAL	3-4 dies	
2365	Cultiu meconi	Recollir en un recipient estèril.		3-4 dies	04/04/2014
5021	Recerca de paràsits en femta	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1100	Tinció de Gram exsudat abscess	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	ABSCÉS	1 dia	04/04/2014
1110	Tinció de Gram exsudat apendicular	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions. Si es possible, recollir fragment de teixit en un contenidor estèril.	EXSUDAT APENDICULAR	1 dia	04/04/2014
1115	Tinció de Gram ferida operatòria	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT FERIDA OPERATÒRIA	1 dia	04/04/2014
1120	Tinció de Gram ferida traumàtica	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT FERIDA TRAUMÀTICA	1 dia	04/04/2014
1125	Tinció de Gram exsudat ossi	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT OSSI	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1160	Tinció de Gram exsudat peritoni	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions. Si es possible, recollir secrecions en un contenidor estèril.	EXSUDAT PERITONEAL	1 dia	04/04/2014
1250	Tinció de Gram exsudat cremada	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT CREMADA	1 dia	04/04/2014
1300	Tinció de Gram líquid sinovial	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID SINOVIAL	2 hores	04/04/2014
1310	Tinció de Gram líquid ascític	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID PERITONEAL	2 hores	04/04/2014
1320	Tinció de Gram LCR	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LCR	2 hores	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1330	Tinció de Gram líquid pericàrdic	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERICARDÍAC	2 hores	04/04/2014
1335	Tinció de Gram punció	Punció aspiració.	PUNCIÓ	1 dia	04/04/2014
1350	Tinció de Gram líquid biliar	Punció, seguint una tècnica rigurosament estèril.	LÍQUID BILIAR	1 dia	04/04/2014
1380	Tinció de Gram úlcera	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració o fragments de teixit. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	ÚLCERA	1 dia	04/04/2014
1500	Tinció de Gram biòpsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.	BIOPSIA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1570	Tinció de Gram teixit	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destilada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.		1 dia	04/04/2014
1950	Tinció de Gram necròpsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.	NECROPSIA	1 dia	04/04/2014
2060	Cultiu exsudat òtic	Neteja de l' oïda amb un antisèptic suau. Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT ÒTIC	2-3 dies	04/04/2014
2070	Cultiu exsudat conjuntival	Evitar l'administració prèvia de col·liris, anestèsics o antibiòtics. Frotis amb escovilló (humidificat amb sèrum fisiològic) amb medi de transport.	EXSUDAT CONJUNTIVAL	2-3 dies	04/04/2014
2100	Cultiu exsudat abscess	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	ABSCÉS	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2110	Cultiu exsudat apendicular	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions. Si es possible, recollir fragment de teixit en un contenidor estèril.	EXSUDAT APENDICULAR	3-4 dies	04/04/2014
2115	Cultiu exs. ferida operatòria	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT FERIDA OPERATÒRIA	3-4 dies	04/04/2014
2120	Cultiu exs. ferida traumàtica	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT FERIDA TRAUMÀTICA	3-4 dies	04/04/2014
2121	Cultiu exsudat mossegada	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT MOSSEGADA	3-4 dies	04/04/2014
2122	Cultiu exsudat peu diabètic	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT PEU DIABÈTIC	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2125	Cultiu exsudat ossi	Frotis amb escovilló amb medi de transport o fragments de mostra.	EXSUDAT OSSI	3-4 dies	04/04/2014
2127	Cultiu pròtesi interna	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	PRÒTESI INTERNA	3-4 dies	04/04/2014
2130	Cultiu exsudat fístula	Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda. Si no es possible, frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT FÍSTULA	3-4 dies	04/04/2014
2150	Exsud rectal (multiresistents)	Frotis amb escovilló amb medi de transport. Introduir passant l' esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.	EXSUDAT RECTAL	3-4 dies	04/04/2014
2160	Cultiu exsudat peritoni	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions. Si es possible, recollir secrecions en un contenidor estèril.	EXSUDAT PERITONEAL	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2200	Cultiu exsudat cutani	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT CUTANI	2-3 dies	04/04/2014
2250	Cultiu exsudat cremada	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT CREMADA	3-4 dies	04/04/2014
2270	Cultiu exsudat umbilical	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT UMBILICAL	2-3 dies	04/04/2014
2300	Cultiu líquid articular	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu	LÍQUID SINOVIAL	3-4 dies	04/04/2014
2310	Cultiu líquid ascític	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID PERITONEAL	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2315	Cultiu líquid biliar	Punció, seguint una tècnica rigurosament estèril.	LÍQUID BILIAR	3-4 dies	04/04/2014
2320	Cultiu LCR	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LCR	3-4 dies	04/04/2014
2330	Cultiu líquid pericàrdic	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERICARDÍAC	3-4 dies	04/04/2014
2350	Cultiu líquid amniòtic	Punció aspiració.	LÍQUID AMNIÒTIC	4-5 dies	04/04/2014
2355	Cultiu placenta	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	PLACENTA	4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2360	Cultiu loquios	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	LOQUIOS	4 dies	04/04/2014
2370	Cultiu punció	Punció aspiració.	PUNCIÓ	3-4 dies	04/04/2014
2380	Cultiu exsudat úlcera	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració o fragments de teixit. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	ÚLCERA	3-4 dies	04/04/2014
2500	Cultiu biòpsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIOPSIA	3-4 dies	04/04/2014
2501	Cultiu biòpsia ganglionar	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	GANGLI	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2510	Cultiu biòpsia cutània	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIOPSIA CUTÀNIA	3-4 dies	04/04/2014
2550	Cultiu moll d'òs	Recollir la mostra per punció-aspiració.	ASPIRAT MOLL D'ÒS	3-4 dies	04/04/2014
2560	Cultiu biòpsia moll d'òs	Recollir la mostra per punció-aspiració.	BIÒPSIA MOLL D'ÒS	3-4 dies	04/04/2014
2570	Cultiu teixit	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	TEIXIT	3-4 dies	04/04/2014
2600	Cultiu punt inserció catèter	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	PUNT INSERCIÓ CATÉTER	2-3 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2601	Cultiu punta catèter	Retirar el catèter i tallar 3-4 cm de la porció més distal (intravascular), introduint el segment en un contenidor estèril.	PUNTA DE CATÉTER	2-3 dies	04/04/2014
2602	Cultiu connexió catèter	Tallar la connexió i introduir-la en un recipient estèril.	CONNEXIÓ CATÉTER	2-3 dies	04/04/2014
2700	Cultiu clau nutri. parenteral	Tallar connexió i introduir-la en un recipient estèril.	CLAU NUTRICIÓ PARENTERAL	2-3 dies	04/04/2014
2705	Cultiu nutrició enteral	Condicions estèrils. Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.	NUTRICIÓ ENTERAL	3 dies	04/04/2014
2710	Cultiu nutrició parenteral	Condicions estèrils. Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.	NUTRICIÓ PARENTERAL	3 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **30 - CULT. GENERALS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2800	Cultiu aigua diàlisi	Recollir la mostra en un recipient estèril.	AIGUA DIÀLISI	5 dies	04/04/2014
2810	Cultiu líquid diàlisi periton.	Recollir la mostra en un recipient estèril. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID DIÀLISI PERITONEAL	3-4 dies	04/04/2014
2811	Cultiu líquid rentat endoscopi	Recollir després del procediment de desinfecció automàtica, seguint instruccions del fabricant. Recollir la mostra en un recipient estèril	LIQUID RENTAT ENDOSCOPI	3 dies	04/04/2014
2813	Cultiu control esterilitat	Condicions estèrils. Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.	CONTROL ESTERILITAT	7 dies	04/04/2014
2850	Cultiu llet materna	Recollir per extracció manual (evitar qualsevol tipus d'accessori), idealment a primera hora del matí (06h00-08h00), descartant les primeres 4-5 gotes.	LLET MATERNA	2-3 dies	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 30 - CULT. GENERALS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2950	Cultiu necropsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.	NECROPSIA	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 40 - RESPIRATORI

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1030	Tinció de Gram esput	Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.	ESPUT	1 dia	04/04/2014
1031	Tinció de Gram esput induït	Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	1 dia	04/04/2014
1032	Tinció de Gram BAS	Fibrobroncoscòpia.	BRONCOASPIRAT SELECTIU	1 dia	04/04/2014
1033	Tinció de Gram BAR	Fibrobroncoscòpia.	RENTAT BRONCO-ALVEOLAR	1 dia	04/04/2014
1035	Tinció de Gram asp. bronquial	Obtenció amb sonda d'aspiració.	ASPIRAT BRONQUIAL	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 40 - RESPIRATORI

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1040	Tinció de Gram aspirat traqueal	Obtenció amb sonda d'aspiració.	EXSUDAT TRAQUEAL	1 dia	04/04/2014
1340	Tinció de Gram líquid pleural	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es pot inocular adicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID PLEURAL	2 hores	04/04/2014
2030	Cultiu esput	Recollir la mostra després d' una espectoració profunda, preferentment matinal.	ESPUT	2-3 dies	04/04/2014
2031	Cultiu esput induït	Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	2-3 dies	04/04/2014
2032	Cultiu bronco-aspirat selectiu	Fibrobroncoscòpia	BRONCOASPIRAT SELECTIU	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 40 - RESPIRATORI

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2033	Cultiu rentat bronco-alveolar	Fibrobroncoscòpia	RENTAT BRONCO-ALVEOLAR	3-4 dies	04/04/2014
2034	Cultiu respatllat bronquial	Fibrobroncoscòpia. Introduir el raspall en un tub amb 1 mL de tioglicolat.	RASPALLAT BRONQ (Barlett)	3-4 dies	04/04/2014
2035	Cultiu aspirat bronquial	Obtenció amb sonda d'aspiració.	ASPIRAT BRONQUIAL	2-3 dies	04/04/2014
2037	Recerca de Pneumocystis (BAS)	Fibrobroncoscòpia	BRONCOASPIRAT SELECTIU	1 dia	04/04/2014
2038	Recerca Pneumocystis (BAR)	Fibrobroncoscòpia	RENTAT BRONCO-ALVEOLAR	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 40 - RESPIRATORI

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2039	Pneumocystis jiroveci esp ind	Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	1 dia	
2040	Cultiu exsudat nasal	Introduir un escovilló amb medi de transport uns 2 cm en el nas.	EXSUDAT NASAL	2-3 dies	04/04/2014
2041	Cultiu exsudat sinusal	Punció aspiració dels sinus.	EXSUDAT SINUSAL	3-4 dies	04/04/2014
2042	Cultiu aspirat nasofaríngic	Frotis: passar escovilló fi amb medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaríngic. Aspirat: aspirar secrecions passant un sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.	EXSUDAT NASOFARINGI	2-3 dies	04/04/2014
2043	Cultiu exsudat faríngic	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les zones amb exsudat, membranes o inflamació.	EXSUDAT FARINGE	1-2 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 40 - RESPIRATORI

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2045	Cultiu exsudat traqueal	Obtenció amb sonda d'aspiració.	EXSUDAT TRAQUEAL	2-3 dies	04/04/2014
2046	Cultiu exsudat traqueostomia	Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT TRAQUEOSTOMIA	2-3 dies	04/04/2014
2050	Cultiu fongs exsudat oral	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.	EXSUDAT ORAL	2-3 dies	04/04/2014
2340	Cultiu líquid pleural	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.	LÍQUID PLEURAL	3-4 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 50 - HEMOCULTIUS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
2025	Hemocultiu	Desinfectar els taps de goma. Localitzar la vena i desinfectar una zona de pell d'uns 5 cm de diàmetre. Guants estèrils, extreure la sang i inocular els flascons evitant l' entrada d'aire al flascó anaerobi. Inocular entre 5-10 mL per flascó.	SANG	7 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 60 - HELICOBACTER

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1520	Tinció de Gram biòpsia antral	Mostra recollida durant una fibrogastrosccòpia. Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	BIOPSIA ANTRAL	1 dia	04/04/2014
1990	Ureasa biòpsia antral	Mostra recollida durant una fibrogastrosccòpia. Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	BIOPSIA ANTRAL	1 dia	04/04/2014
2520	Cultiu biòpsia antral	Mostra recollida durant una fibrogastrosccòpia. Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	BIOPSIA ANTRAL	7-10 dies	04/04/2014
3520	Antibiograma biòpsia Antral	Mostra recollida durant una fibrogastrosccòpia. Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	BIOPSIA ANTRAL	21 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
6001	Baciloscòpia orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	1 dia	04/04/2014
6010	Baciloscòpia punció renal	Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.	PUNCIÓ RENAL	1 dia	04/04/2014
6027	Baciloscòpia tràquea	Obtenció amb sonda d'aspiració.	EXSUDAT TRAQUEAL	1 dia	04/04/2014
6030	Baciloscòpia esput	Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.	ESPUT	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
6031	Baciloscòpia esput induït	Induir l'esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. És útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	1 dia	04/04/2014
6032	Baciloscòpia BAS	Fibrobroncoscòpia.	BRONCOASPIRAT SELECTIU	1 dia	04/04/2014
6033	Baciloscòpia BAR	Fibrobroncoscòpia.	RENTAT BRONCO-ALVEOLAR	1 dia	04/04/2014
6035	Baciloscòpia aspirat bronquial	Obtenció amb sonda d'aspiració.	ASPIRAT BRONQUIAL	1 dia	04/04/2014
6100	Baciloscòpia abscess	Recollir la mostra per punció-aspiració o biòpsia.	ABSCÉS	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
6130	Baciloscòpia exsudat fístula	Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda.	EXSUDAT FÍSTULA	1 dia	04/04/2014
6135	Baciloscòpia aspirat gàstric	Aspiració amb sonda gàstrica en dejú de 8 hores.	ASPIRAT GÀSTRIC	1 dia	04/04/2014
6300	Baciloscòpia líquid articular	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació.	LÍQUID SINOVIÀL	1 dia	04/04/2014
6310	Baciloscòpia líquid ascític	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERITONEAL	1 dia	04/04/2014
6320	Baciloscòpia LCR	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LCR	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
6330	Baciloscòpia líquid pericàrdic	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERICARDÍAC	1 dia	04/04/2014
6340	Baciloscòpia líquid pleural	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PLEURAL	1 dia	04/04/2014
6370	Baciloscòpia punció	Punció aspiració.	PUNCIÓ	1 dia	04/04/2014
6500	Baciloscòpia biòpsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIÒPSIA MOLL D'ÒS BIÒPSIA MOSTRA SIGMOIDOSCÒPIA	1 dia	04/04/2014
6510	Baciloscòpia biòpsia cutània	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIÒPSIA CUTÀNIA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
6570	Baciloscòpia teixit	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	TEIXIT	1 dia	04/04/2014
6900	Baciloscòpia semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	1 dia	04/04/2014
7001	Cultiu BK orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	60 dies	04/04/2014
7010	Cultiu BK punció renal	Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.	PUNCIÓ RENAL	60 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
7027	Cultiu BK tràquea	Obtenció amb sonda d'aspiració.	EXSUDAT TRAQUEAL	60 dies	04/04/2014
7030	Cultiu BK esput	Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.	ESPUT	60 dies	04/04/2014
7031	Cultiu BK esput induït	Induir l'esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	60 dies	04/04/2014
7032	Cultiu BK BAS	Fibrobroncoscòpia	BRONCOASPIRAT SELECTIU	60 dies	04/04/2014
7033	Cultiu BK BAR	Fibrobroncoscòpia	RENTAT BRONCO-ALVEOLAR	60 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
7035	Cultiu BK aspirat bronquial	Obtenció amb sonda d'aspiració.	ASPIRAT BRONQUIAL	60 dies	04/04/2014
7100	Cultiu BK abscess	Recollir la mostra per punció-aspiració o biòpsia.	ABSCÉS	60 dies	04/04/2014
7130	Cultiu BK exsudat fístula	Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda.	EXSUDAT FÍSTULA	60 dies	04/04/2014
7135	Cultiu BK aspirat gàstric	Aspiració amb sonda gàstrica en dejú de 8 hores.	ASPIRAT GÀSTRIC	60 dies	04/04/2014
7300	Cultiu BK líquid sinovial	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació.	LÍQUID SINOVIÀL	60 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
7310	Cultiu BK líquid ascític	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERITONEAL	60 dies	04/04/2014
7320	Cultiu BK LCR	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LCR	60 dies	04/04/2014
7330	Cultiu BK líquid pericàrdic	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PERICARDÍAC	60 dies	04/04/2014
7340	Cultiu BK líquid pleural	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID PLEURAL	60 dies	04/04/2014
7370	Cultiu BK punció	Punció aspiració.	PUNCIÓ	60 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **70 - BK**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
7500	Cultiu BK biopsia	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIÒPSIA MOLL D'ÒS BIÒPSIA MOSTRA SIGMOIDOSCÒPIA	60 dies	04/04/2014
7510	Cultiu BK biopsia cutània	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIÒPSIA CUTÀNIA	60 dies	04/04/2014
7570	Cultiu BK teixit	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	TEIXIT	60 dies	04/04/2014
7900	Cultiu BK semen	Obtenir la mostra per masturbació. Recollir en un recipient estèril.	SEMEN	60 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **80 - FONGS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
8030	Cultiu de fongs esput induït	Induir l' esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.	ESPUT INDUÏT	30 dies	04/04/2014
8035	Cultiu fongs aspirat bronquial	Obtenció amb sonda d'aspiració.	ASPIRAT BRONQUIAL	30 dies	04/04/2014
8043	Cultiu fongs exsudat faringic	Frotis amb escovilló amb medi de transport de les zones amb exsudat, membranes o inflamació.	EXSUDAT FARINGE	2-3 dies	04/04/2014
8100	Cultiu de fongs abscess	Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.	ABSCÉS	30 dies	04/04/2014
8200	Cultiu fongs exsudat cutani	Frotis amb escovilló amb medi de transport.	EXSUDAT CUTANI	30 dies	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **80 - FONGS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
8239	Exàmen KOH escames	Raspallar les escames amb una fulla de bisturí, en la zona perifèrica de la lesió. Recollir les escames en un recipient estèril i afegir la fulla de bisturí.	ESCAMES	1 dia	04/04/2014
8240	Cultiu fongs escames	Raspallar les escames amb una fulla de bisturí, en la zona perifèrica de la lesió. Recollir les escames en un recipient estèril i afegir la fulla de bisturí.	ESCAMES	30 dies si el resultat es negatiu	04/04/2014
8259	Exàmen en KOH cabells	Escollir els cabells afectats, tallar a 2cm i estirar del fol·licle pilós. Recollir en un recipient estèril.	CABELLS	1 dia	04/04/2014
8260	Cultiu de fongs cabells	Escollir els cabells afectats, tallar a 2cm i estirar del fol·licle pilós. Recollir en un recipient estèril.	CABELLS	30 dies si el resultat es negatiu	04/04/2014
8264	Exàmen en KOH ungles	Tallar amb tisores fragments de les ungles afectades. Ocasionalment, amb un bisturí fer raspallat suau subunguial. Recollir en un recipient estèril.	UNGLA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **80 - FONGS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
8265	Cultiu fongs ungles	Tallar amb tisores fragments de les ungles afectades. Ocasionalment, amb un bisturí fer raspallat suau subunguial. Recollir en un recipient estèril.	UNGLA	30 dies si el resultat es negatiu	04/04/2014
8510	Cultiu fongs biopsia cutània	Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. No introduir mai la mostra en formol.	BIOPSIA CUTÀNIA	30 dies si el resultat es negatiu	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 100 - ANTIGENS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
5001	Detecció Ag. Legionella orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig).	ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	1 dia	04/04/2014
5005	Detecció Ag. Pneumococ orina	Neteja de la zona genital. Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril.	ORINA SONDA PERMANENT ORINA RENTAT VESICAL ORINA NEFROSTOMIA ORINA CATÉTER URETERAL ORINA PUNCIÓ VESICAL ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA	1 dia	04/04/2014
5020	Detecció Adenovirus en femta	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	
5022	C difficile Toxina i Ag (GDH)	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA MOSTRA SIGMOIDOSCÒPIA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 100 - ANTIGENS

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
5023	Detecció Ag H. pylori en femta	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	04/04/2014
5025	Detecció Rotavirus en femta	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	
5030	Detecció de antigen de Giardia	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	04/04/2014
5031	Detecció Ag Cryptosporidium	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	04/04/2014
5032	Antigen E.histolytica_dispar	Recollir en un recipient estèril. No son aptes mostres recollides amb escovilló.	FEMTA	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **100 - ANTIGENS**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
5050	Detecció Ag. Plasmodium sang	Punció venosa amb tub EDTA.	SANG	1 dia	04/04/2014

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4001	Bordetella pertussis - PCR	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI	1 dia	13/07/2018
4002	Bordetella parapertussis - PCR	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI	1 dia	13/07/2018
4005	Clostridium difficile toxina PCR	Recollir en un recipient estèril. No recollir femtes no formades. No son aptes mostres recollides amb escovillò.	FEMTA	1 dia	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4010	Chlamydia trachomatis PCR	Recollir orina en un pot estèril. Utilitzar escovillons secs (sense medi de transport) introduïts en un tub amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	ORINA URETRAL SEMEN BIOPSIA EXSUDAT TROMPA UTERINA EXSUDAT VAGINAL EXSUDAT CONJUNTIVAL EXSUDAT FARINGE EXSUDAT URETRAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA EXSUDAT ENDOCERVICAL EXSUDAT RECTAL	1 dia	13/07/2018
4011	Neisseria gonorrhoeae PCR	Recollir orina en un pot estèril. Utilitzar escovillons secs (sense medi de transport) introduïts en un tub amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.	ORINA URETRAL SEMEN BIOPSIA EXSUDAT TROMPA UTERINA EXSUDAT VAGINAL EXSUDAT CONJUNTIVAL EXSUDAT FARINGE EXSUDAT URETRAL ORINA POST MAS. PROSTATIC ORINA CATETERISME ORINA ESPONTÀNIA EXSUDAT ENDOCERVICAL EXSUDAT RECTAL	1 dia	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 400 - PCR

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4045	Grip A (PCR)	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	1 dia	13/07/2018
4046	Grip B (PCR)	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	1 dia	13/07/2018
4048	VRS (PCR) - Panell respiratori VRS / GeneXpert	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	1 dia	13/07/2018
4049	Panell respiratori - Parainfluenza (1_4) (PCR)	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	1 dia	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4050	Panell respiratori - Adenovirus (PCR)	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	-	13/07/2018
4051	Panell respiratori - Coronavirus (PCR)	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERICARDÍAC	-	13/07/2018
4052	Panell respiratori - Rhinovirus (PCR)	-	EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR LÍQUID PERICARDÍAC	-	
4053	Panell respiratori - Enterovirus (PCR)	-	EXSUDAT NASOFARINGI ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR FEMTA LÍQUID PERICARDÍAC	-	

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4054	Panell respiratori - <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (PCR)	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU	-	13/07/2018
4055	Panell respiratori - <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (PCR)	-	EXSUDAT NASOFARINGI RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU	-	13/07/2018
4056	Panell respiratori - MERS coV (qPCR)	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI	-	13/07/2018
4057	SARS-CoV-2 (qPCR)	ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI BRONCOASPIRAT SELECTIU	1 dia	30/04/2021
4060	Panell respiratori - Enterovirus_Rhinovirus (PCR)	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4100	Panell meningo encefalitis (LCR) Varicela-zoster - PCR	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	EXSUDAT NASAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU LCR EXSUDAT CUTANI	3-4 hores	13/07/2018
4102	Panell meningo encefalitis (LCR) Herpes 6 - PCR	-	LCR	-	13/07/2018
4104	Panell meningo encefalitis (LCR) Herpes simple 1 - PCR	-	BIOPSIA EXSUDAT VAGINAL EXSUDAT ORAL EXSUDAT FARINGE EXSUDAT NASAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU EXSUDAT URETRAL LCR BALANO-PREPUICIAL EXSUDAT CUTANI	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4105	Panell meningo encefalitis (LCR) Herpes simple 2 - PCR	-	BIOPSIA EXSUDAT VAGINAL EXSUDAT ORAL EXSUDAT FARINGE EXSUDAT NASAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU EXSUDAT URETRAL LCR BALANO-PREPUICIAL EXSUDAT CUTANI	-	13/07/2018
4110	Panell meningo encefalitis (LCR) Enterovirus - PCR	-	EXSUDAT ORAL EXSUDAT FARINGE LCR	-	13/07/2018
4111	Panell respiratori- Metapneumovirus - PCR	-	EXSUDAT FARINGI i NASAL EXSUDAT NASOFARINGI RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU	-	13/07/2018
4120	Panell meningo encefalitis (LCR) Escherichia coli K1 - PCR	-	LCR	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4121	Panell meningo encefalitis (LCR) Haemophilus influenzae - PCR	-	SANG LCR	-	13/07/2018
4122	Panell meningo encefalitis (LCR) Listeria mocytoenes - PCR	-	SANG LCR	-	13/07/2018
4123	Panell meningo encefalitis (LCR) Neisseria meningitidis - PCR	-	SANG LCR	-	13/07/2018
4124	Panell meningo encefalitis (LCR) Streptococcus agalactiae - PCR	-	SANG LCR	-	13/07/2018
4125	Panell meningo encefalitis (LCR) Streptococcus pneumoniae - PCR	-	SANG LCR LÍQUID PERITONEAL	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: 400 - PCR

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4126	Panell meningo encefalitis (LCR) Citomegalovirus - PCR	-	ASPIRAT MOLL D'ÒS BIOPSIA RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU ORINA ESPONTÀNIA EXSUDAT ENDOCERVICAL LCR	-	13/07/2018
4127	Panell meningo encefalitis (LCR) Parechovirus - PCR	-	LCR	-	13/07/2018
4128	Panell meningo encefalitis (LCR) Cryptococcus neoformans - PCR	-	LCR	-	13/07/2018
4150	Panell sepsia- Enterococcus sp (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4151	Panell sepsia- Staphylococcus sp (PCR)	-	SANG	A partir d'hemocultiu positiu.	13/07/2018
4152	Panell sepsia- Staphylococcus aureus (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4153	Panell sepsia- Streptococcus sp (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4154	Panell sepsia- Streptococcus pyogenes (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4155	Panell sepsia- Acinetobacter baumannii (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4156	Panell sepsia- Enterobacteriaceae (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4157	Panell sepsia- Enterobacter cloacae (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4158	Panell sepsia- Escherichia coli (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4159	Panell sepsia- Klebsiella oxytoca (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4160	Panell sepsia- Klebsiella pneumoniae (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4161	Panell sepsia- Proteus sp (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4162	Panell sepsia- Serratia marcescens (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4163	Panell sepsia- Pseudomonas aeruginosa (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4164	Panell sepsia- Candida albicans (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4165	Panell sepsia- Candida glabrata (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4166	Panell sepsia- <i>Candida krusei</i> (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4167	Panell sepsia- <i>Candida parapsilosis</i> (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4168	Panell sepsia- <i>Candida tropicalis</i> (PCR)	-	SANG	-	13/07/2018
4200	Panell gastrointestinal - <i>Campylobacter</i> PCR	Recollir en un recipient estèril. Intentar recollir femtes no formades (mostres líquides de preferència). No son aptes mostres recollides amb escovillò.	FEMTA	1 dia	13/07/2018
4201	Panell gastrointestinal - <i>Plesiomonas shigelloides</i> PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4202	Panell gastrointestinal - Salmonella sp PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4203	Panell gastrointestinal - Vibrio sp PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4204	Panell gastrointestinal - Yersinia enterocolitica PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4205	Panell gastrointestinal - Escherichia coli patogenic PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4206	Panell gastrointestinal - Shigella sp / E.coli enteroinvasiu PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4210	Panell gastrointestinal - Cryptosporidium sp - PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4211	Panell gastrointestinal - Cyclospora cayetanensis PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4212	Panell gastrointestinal - Entamoeba histolytica PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4213	Panell gastrointestinal - Giardia lamblia PCR -	-	FEMTA	-	13/07/2018
4221	Panell gastrointestinal - Astrovirus PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4222	Panell gastrointestinal - Norovirus PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4223	Panell gastrointestinal - Rotavirus PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4224	Panell gastrointestinal - Sapovirus PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4225	Panell gastrointestinal - Adenovirus 40-41 PCR	-	FEMTA	-	13/07/2018
4300	HPV (PCR)	Recollir exsudat endocervical amb un escobilló sec (sense medi de transport).	EXSUDAT URETRAL	1 dia	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **400 - PCR**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
4701	PCR Mycobacterium tuberculosis	Veure condicions per cultiu de Micobacteris.	BRONCOASPIRAT SELECTIU LÍQUID PERITONEAL LCR LÍQUID PLEURAL PUNCIÓ ORINA ESPONTÀNIA ORINA SONDA PERMANENT ASPIRAT GASTRIC ESPUT INDUÏT TEIXIT RENTAT BRONCO-ALVEOLAR ASPIRAT BRONQUIAL ABSCÉS BIOPSIA BIOPSIA CUTÀNIA ASPIRAT MOLL D'ÒS ESPUT	1 dia	13/07/2018
4702	Detecció resistència RIF qPCR	Veure condicions per cultiu de Micobacteris	BIOPSIA ASPIRAT BRONQUIAL RENTAT BRONCO-ALVEOLAR BRONCOASPIRAT SELECTIU ESPUT	1 dia	13/07/2018
4720	Carbapenemasa PCR	Recollir en un recipient estèril. Recollir femtes formades. Igualment es poden recollir mostres de exsudat rectal amb escovillò sense medi de transport.	EXSUDAT FERIDA OPERATÒRIA FEMTA EXSUDAT RECTAL	1 dia	13/07/2018

Versió: 4.0 Data: 10/06/2021

Acreditació ENAC 1092/LE2077 -- ISO 15189

Secció: **999 - ALTRES**

Codi	Prova	Condicions d'obtenció	Mostra	Termini	Acreditació
1026	Recerca Plasmòdium microscòpia	Punció venosa amb tub EDTA.	SANG	1 dia	
5315	Recerca paràsits I. biliar	Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.	LÍQUID BILIAR	1 dia	04/04/2014

Facultatius responsables de Microbiologia:

Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro

